

zeta 5 power act

La solución 3 en 1 para desinfectar, limpiar y desodorizar

los circuitos de aspiración



INDICACIONES DE USO: Desinfectante para circuitos de aspiración. Solución líquida concentrada libre de aldehídos y fenoles para la desinfección, limpieza y desodorización de los circuitos de aspiración y escupidera.

PRESENTACIÓN: Monodosis de 10 ml.
COMPOSICIÓN: Cada 100 g de Zeta 5 Power Act contiene 5 g de N-(3-Aminopropil)-N-Dodecildipropano-1,3-Diamina, 4,2 g de Propionato de N,N-Metilpiperidil(oxetil)ammonio, tensioactivos, inhibidores de corrosión, aditivos, auxiliares y agua en cantidad suficiente para 100 g.

CONTRAINDICACIONES: No se conoce ninguna contraindicación.
ADVERTENCIAS: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. En caso de contacto con la piel o con el cabello, quitarse la ropa contaminada y aclarar la piel. En caso de contacto con los ojos aclarar con abundante agua durante varios minutos. Quitarse las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Si la irritación persiste consultar con un médico. En caso de ingestión, enjuagarse la boca, no provocar el vómito y contactar inmediatamente con un centro de información toxicológica o con un médico.

PRECAUCIONES: Llevar guantes, ropa de protección y proteger los ojos y la cara. Lavarse las manos tras la manipulación. Evitar su eliminación al medio ambiente y eliminarlos de acuerdo con las normas locales. Se recomienda almacenar el producto bien cerrado, en un lugar fresco y seco y lejos de la luz solar directa. La fecha de caducidad del producto es válida si el envase se encuentra en óptimas condiciones y correctamente almacenado. Se recomienda almacenar el producto a una temperatura no superior a 27 °C.

EFFECTOS SECUNDARIOS: No se han observado efectos secundarios.

INSTRUCCIONES PASO A PASO:

1. Aclarar el sistema de aspiración, aspirando 2 litros de agua fría (fig. 1).
2. Preparar al menos un litro de solución por cada equipo dental: llenar un recipiente con agua y verter 10 ml de Zeta 5 Power Act por cada litro de agua (figs. 2, 3, 4).
3. Mezclar (fig. 5). La solución aparecerá opalescente.
4. Aspirar la solución preparada a través de los tubos de aspiración (fig. 6). Verter al menos 250 - 300 ml de solución desinfectante en la escupidera.

zeta 5 power act

Desinfectante y detergente
para unidades de succión

Zhermack
Dental



zeta 5 power act

FEEL SAFE

Desinfectante y detergente para unidades de succión que permite escoger entre una desinfección rápida y una completa.

Zeta 5 Power Act, fabricado y probado por Zhermack, ofrece protección y seguridad y es compatible con los principales equipos dentales del mercado.



Fulfilling your needs

Zhermack S.p.A. | Via Bovazecchino, 100 | 45021 Badia Polesine (RO) Italy
T +39 0425 597611 | F +39 0425 53596 | info@zhermack.com | www.zhermack.com

Zhermack

F198116 - 19-07

ESPECTRO DE ACCIÓN

Entidad (microorganismos)	Norma de referencia	Concentración	Tiempo de acción (minutos)
Bacterida (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)	EN 13727	1 %	15
	EN 14561	1 %	15
	EN 13624	1 %	15
	EN 14562	1 %	15
Tuberculida (M. terrae)	EN 14348	1 %	240
En forma limitada virulencia contra virus encapsulados y lipofílicos, incluyendo virus en la sangre (VH, VHB, VHC), herpes simple y las familias de virus como orthomyxoviridae (incluyendo todos los virus de la gripe humana y animal como el H5N1 y H1N1), filoviridae (virus del Ebo(a) y paramyoviridae (virus del sarampión))	pREN 16777	1 %	60
DV (superficies no porosas)	DV	1 %	60
VAH	VAH	0,5%	60

OBSERVACIONES IMPORTANTES: las informaciones suministradas en cualquier otra forma, incluso durante las demostraciones, no exoneran de respetar las instrucciones de uso. El operador sanitario debe controlar que el producto sea apto para la aplicación prevista. La empresa no se hace responsable de daños, incluso a terceros, que surjan por el incumplimiento de las instrucciones o por resultar el producto no apto a la aplicación y, en cualquier caso, dentro de los límites del valor de los productos suministrados.

SOLO PARA USO PROFESIONAL

ZETA 5 POWER ACT / ES - PELIGRO
Puede ser corrosivo para los metales. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Evitar su liberación al medio ambiente: Llevar guantes/pinzas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA. Contiene: HIDROXIDO DE POTASIO; N-(3-AMINOPROPIL)-N-DODECILDIPROPANO-1,3-DIAMINA; PROPIONATO DE N,N-DIECL-N-METIL-PIPERIDIL(OXETIL)AMONIO.



Aclarado



1

Aclarar el sistema de aspiración, aspirando 2 litros de agua fría.

Dosificación: 1%



2

Llenar un recipiente con agua y verter 10 ml de Zeta 5 Power Act por cada litro de agua. Preparar al menos un litro de solución por cada equipo dental.

Mezclado



3

Mezclar la solución obtenida.

Aspiración



4

Aspirar la solución preparada a través de los tubos de aspiración. Dejar actuar durante el tiempo de acción.

Desinfección de la escupidera



Verter al menos 250 - 300 ml de solución desinfectante en la escupidera.

Tiempo de acción



5

Para una acción rápida dejar actuar 15'.

Para una acción completa dejar actuar durante al menos 4 horas (toda la noche).

Aclarado



6

Aclarar el sistema de aspiración, aspirando 2 litros de agua fría.